

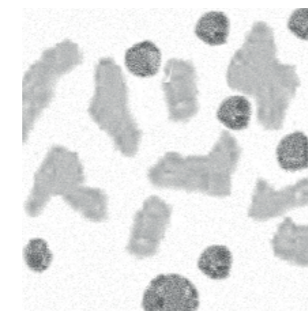


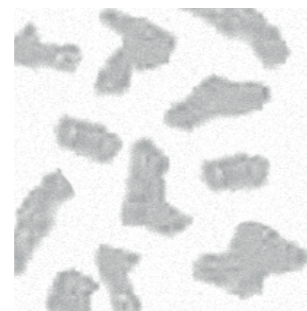

— Eine komplette Auswahl an hoch-qualitativen Dentalamalgamen

Das Spektrum an Legierungen umfaßt sowohl hochfeste Feilungslegierungen sowie feine Disperslegierungen mit außerordentlichen klinischen Eigenschaften.

Unsere Amalgame liegen bezüglich Qualität in verschiedener Hinsicht über dem Durchschnitt. Sie weisen eine ausgeglichene Klebfähigkeit und höchste Festigkeit auf. Dank dieser Kombination sind die Füllungen randstabil, dicht und sehr langlebig.

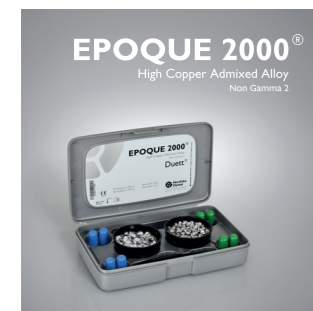

Kombination von kugelförmigen und symmetrischen Partikeln, EPOQUE 2000

Symmetrische Partikel und Kupfersilber-Eutektikum in Form von kugelförmigen Partikeln, EPOQUE 70

ZUSAMMENSETZUNG
 Ag 43,1%
 Sn 30,8%
 Cu 26,1%

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
 Druckfestigkeit:
 1 h 140 MPa
 24 h 450 MPa
 Kriechdehnung: 0,1%
 Expansion: 24 h +0,02%

ZUSAMMENSETZUNG
 Ag 69,9%
 Sn 18,8%
 Cu 10,2%
 Zn 1,1%

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
 Druckfestigkeit:
 1 h 110 MPa
 24 h 420 MPa
 Kriechdehnung: 1,0%
 Expansion: 24 h +/-0,1%

EPOQUE 2000
 High Copper Admixed Alloy
 Non Gamma 2

ERHÄLTBAR ALS:
 DUETTS
 KAPSELN
 PULVER

EPOQUE 70
 Dispersionsamalgam
 Non Gamma 2

ERHÄLTBAR ALS:
 DUETTS
 KAPSELN
 PULVER

EPOQUE 2000

■ EIGENSCHAFT	● VORTEIL
Hoher Kupferanteil	Dauerhaft, resistent und hohe Festigkeit
Kontrollierte Ausdehnung	Hervorragende Anpassung an den Rändern
Spanartige Metallpartikel	Knuspriges Gefühl beim Kondensieren
Kurze Abbindezeit	Zeitsparend

EPOQUE 70

■ EIGENSCHAFT	● VORTEIL
Hoher Silberanteil	Silbern glänzende Oberfläche
Kugelförmige Partikel	Weiches Gefühl beim Kondensieren



Ein verlässlicher Partner
EPOQUE Amalgame



Nordiska Dental AB, Box 1082, SE-262 21 Ängelholm, Location; Framtidsgatan 1b, SE-262 73 Ängelholm, Sweden.
 Tel: +46 431 44 33 60, Fax: +46 431 44 33 99
 www.nordiskadental.se, mail@nordiskadental.se, certified acc. to ISO 13485



Duett® – die Sicherheit und Komfort von Kapseln zum Spartarif!

Das Duett-Kapselsystem ist im Vergleich zu anderen Kapseln umweltfreundlich. Die wiederverwendbaren Kapseln sind gut verschleißbar und gewährleisten Qualität und Hygiene. Im Vergleich zu Wegwerfkapseln können mit Duett Kosten eingespart werden. Außerdem ist es komfortabel und kostengünstig eine Packung Duetts statt 3 verschiedener Packungen Kapseln zu verwenden. Zahnärzte bestätigen die homogenen, gut gemischten Amalgamportionen der Duetts.

DUETT -

EIGENSCHAFT	VORTEIL
Kostenersparnis	Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen Kapseln
Komfort	Einfache Dosierung und Mischung
Sicherheit	Kein freies Quecksilber
Hygiene	Geringe Quecksilberabgabe
Umweltverträglichkeit	Weniger Abfall




PACKUNGSGRÖSSEN



Duett® 400
400 Tabletten und 400 Quecksilberkissen, 8 wiederverwendbare Mischkapseln



Duett® 50
50 Tabletten und 50 Quecksilberkissen, 2 wiederverwendbare Mischkapseln

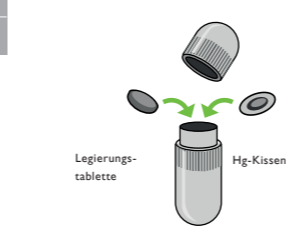

EINFACHE VERWENDUNG

Verwenden Sie eine Pinzette, um eine oder zwei Tabletten und ein oder zwei Quecksilberkissen in die Kapsel zu geben. Damit Sie jederzeit einige Kapseln bereit haben, können Sie welche im Voraus füllen. Es werden immer die gleichen Mengen verwendet.

ANMERKUNG
Die Legierungstablette und das Quecksilberkissen haben jeweils eine Masse von 390mg.

”Es ist nicht das Silber, das ein Topamalgam ausmacht, sondern das Kupfer”

EPOQUE 2000®



Pulver – Flexible Mischungsmöglichkeiten

Nordiska Legierungen sind weltbekannt und werden seit Jahrzehnten erfolgreich verwendet. Zahnärzte überall auf der Welt schätzen seit Generationen die langlebigen Füllungen mit ANA 2000.

PULVER

VORTEIL
Flexible Mischungsmöglichkeiten
Preis



500 g.

PULVER

Das Pulver ist in 500g Flaschen erhältlich.

Vordosierte Kapseln

Eine präzise Dosierung in jeder Kapsel sorgt konstant für eine garantierte Konsistenz! Da die Arbeitszeit eine grosse Rolle spielt, ist es wichtig ein System zu nutzen, das einfach und schnell funktioniert. Unsere selbstaktivierenden Kapseln sind dafür hervorragend geeignet.

Epoque 2000 -

Die Epoque 2000 Kapseln wurden kürzlich optimiert, um eine noch höhere Qualität zu erreichen. Das neue Design führt zu einer homogenen Mischung.

KAPSELN

EIGENSCHAFT	VORTEIL
Neues Design	Optimale Amalgamisierung
Vordosiert	Sicher und dicht
Selbstaktivierend	Genauere Konsistenz
Farbkodiert	Zeitsparend
	Einfach zu mischen
	Einfach zu unterscheiden



EPOQUE 2000 KAPSELN

- No. 1 – Grüne Kapsel (400 mg Legierung+400 mg Quecksilber)
- No. 2 – Blaue Kapsel (600 mg Legierung+600 mg Quecksilber)
- No. 3 – Graue Kapsel (800 mg Legierung+800 mg Quecksilber)



Die Kapseln werden in Packungen von 50 oder 450 Kapseln geliefert.

Epoque 70 -

KAPSELN

EIGENSCHAFT	VORTEIL
Vordosiert	Genauere Konsistenz
Selbstaktivierend	Zeitsparend
Farbkodiert	Einfach zu mischen
	Einfach zu unterscheiden



Die Kapseln werden in Packungen von 50 oder 450 Kapseln geliefert.



EPOQUE 70 KAPSELN

- No. 1 – Goldene Kapsel (400 mg Legierung+430 mg Quecksilber)
- No. 2 – Orangene Kapsel (600 mg Legierung+640 mg Quecksilber)
- No. 3 – Violette Kapsel (800 mg Legierung+860 mg Quecksilber)

